

感謝閣下購買我公司的商品。使用前，請務必閱讀此說明書後正確地使用本商品。同時，請將本說明書放置於隨時可以取用地方保管。本說明書使用的插圖，是為了便於使用者理解操作和組裝方法，實物相比有可能略有差異。如將本品轉讓於他人時，請將本說明書一併轉讓。

## 商品用途

- 請將本商品在淋浴時或洗身體時，作為浴椅使用。

## 商品特點

- 座面的高度可以在35~45cm（J型為32~42cm）範圍之間調節，可根據體型和症狀來合理調節高度。
- 不使用時可以將浴椅折起變成便攜式，在浴室也不會佔用空間。
- 可用單手簡單方便地收放座面。
- 折疊時，浴椅可以獨立站立，不需用手托扶或者靠牆擺放。
- 柔軟座面和柔軟靠背採用防吸水材質製造，可抑制發霉和發生異味。
- 柔軟座面和柔軟靠背可以拆下清洗，保證衛生安全。
- 採用輕巧且不易生鏽的鋁管。
- 扶手可以向上拉起，洗澡時動作方便靈活運用。（只包括有扶手型）

### ○符號說明

本使用說明書為使顧客安全使用，對需要遵守的注意事項使用了以下的符號。請在充分理解各符號後正確使用本商品。

**警告** … 錯誤使用時，有引發死亡或重大的傷害事故、物品受損的可能。

**注意** … 錯誤使用時，有引發輕度傷害、物品損害的可能。

**重要** … 錯誤使用時，有導致產品故障、損害、縮短使用壽命等的可能。

## 使用注意事項

### 警告

- 請勿在規定用途以外使用，以免造成物品的破損或對人體造成傷害。
- 此商品在折疊和打開時，請注意不要把手指夾入。在浴椅折疊時根據站立位置不同，可能會造成腳被浴椅夾住的情況，站立在浴椅側面折疊浴椅時，請不要把腳放入折疊椅下方，以免導致受傷。
- 在抬起或降下扶手時，請注意不要把手或手指夾入，會導致受傷。（僅限有扶手型）
- 請在看護人的陪同或幫助下使用。
- 請定期檢查是否有固定浴椅管和座面以及靠背的螺絲是有否鬆動。如發生鬆動，請擰緊螺絲。
- 請勿將本商品用作踏腳台，請不要站立在座面上，否則容易受傷。
- 請勿直接用手支撐靠背移動或站起，以免造成商品不穩定，發生跌倒並受傷。（限於有靠背型，有扶手型）
- 坐著或站起來時，請勿大幅度搖晃身體，導致商品單側受力過大引起跌倒和受傷。
- 請勿過度後仰，導致靠背承重過重，造成跌倒和受傷。

### 注意



- 體重在100公斤以上的人請勿使用，否則會造成商品的損壞。
- 當有人坐在該商品上時，請勿搬動浴椅。
- 使用前請再次確認座位下方的鎖是否已經固定。
- 請勿在盛有熱水的浴缸中使用，會產生座面上浮而不穩定。並且水可能流入座面和靠背裡面，無法排出。
- 請勿把椅腳下的橡膠卸除使用，否則會發生浴椅滑動的危險。
- 請勿讓孩子使用或當玩具使用。
- 使用前後，請將地板和浴椅周圍的肥皂和洗髮精等沖洗乾淨，不然會導致跌倒造成傷害。
- 請根據使用者的身體狀況，向銷售商或專家諮詢有關座面的高度調節等的建議。

### 重要


- 請勿擅自改造本商品，也不要使用其他零部件來代替使用。
- 請避免太陽光的直射和高溫，會導致變形和變質。
- 請勿靠近火源，否則會導致變形和變質。

## 部件名稱


### ●R型有扶手

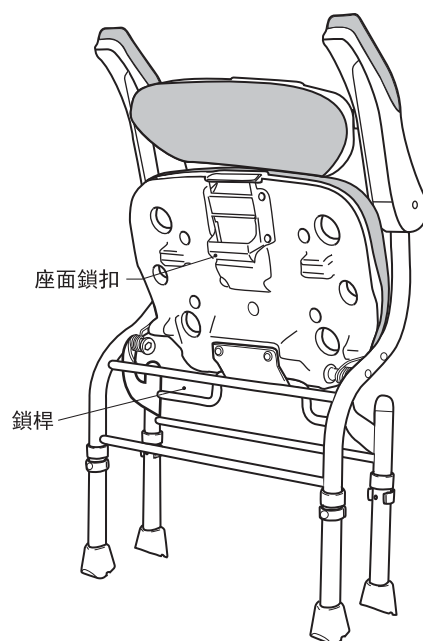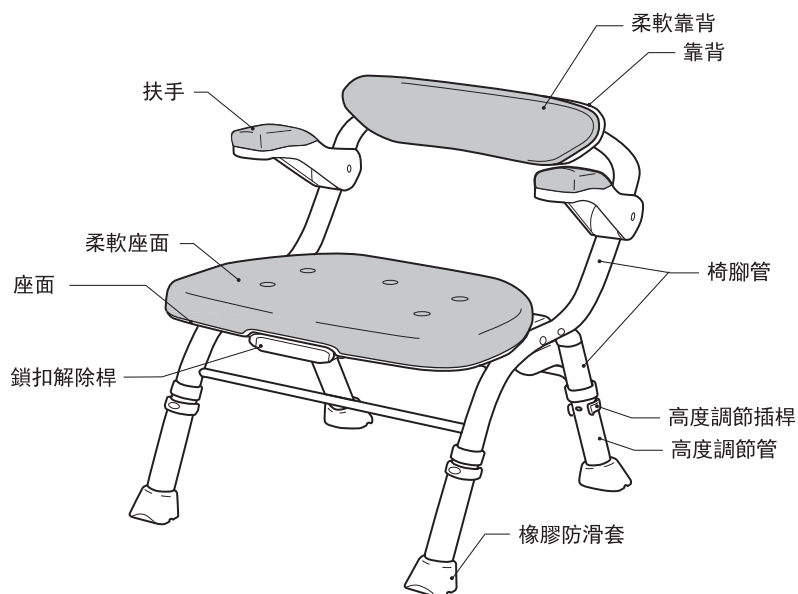


### ●R型無靠背

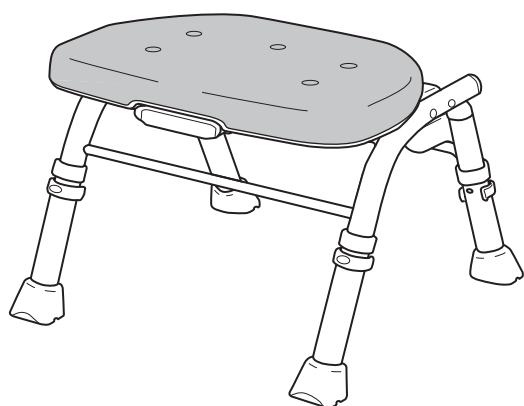


### ●R型有靠背

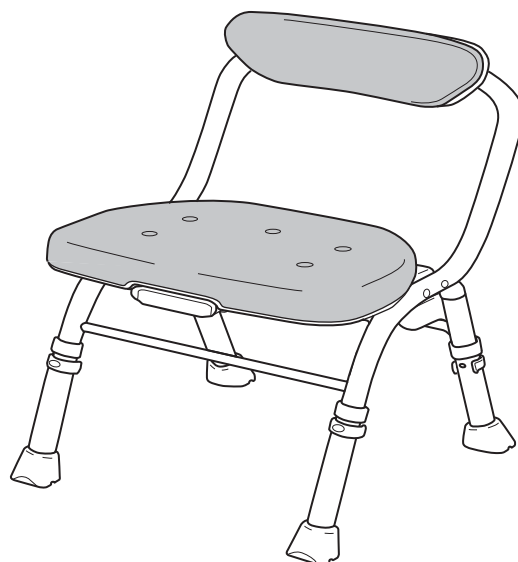


### ●U型有靠背

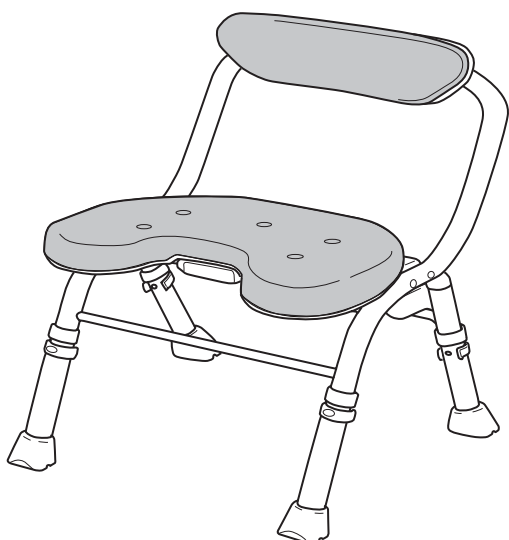


### ●U型有扶手

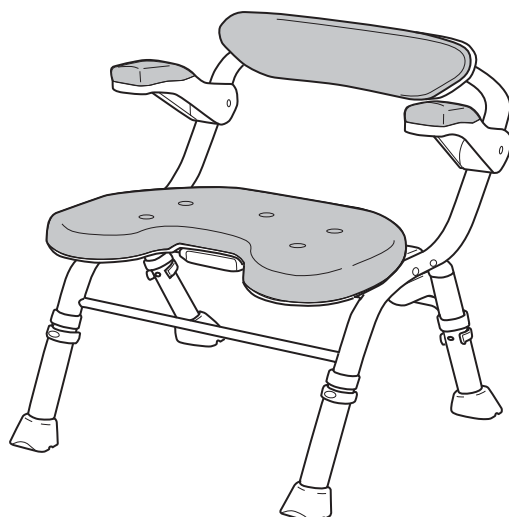


●M型無靠背

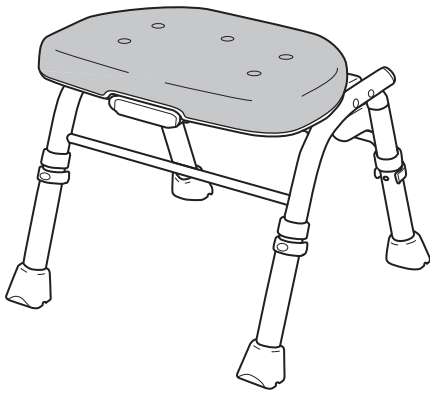


●M型有靠背L

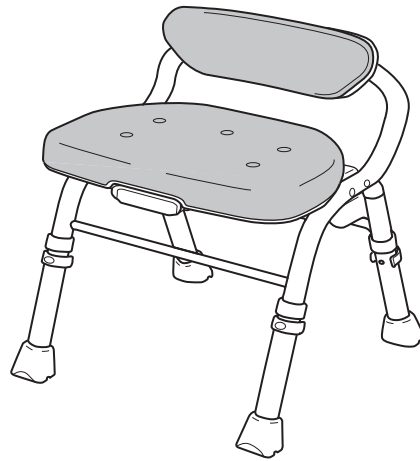


●M型有靠背H

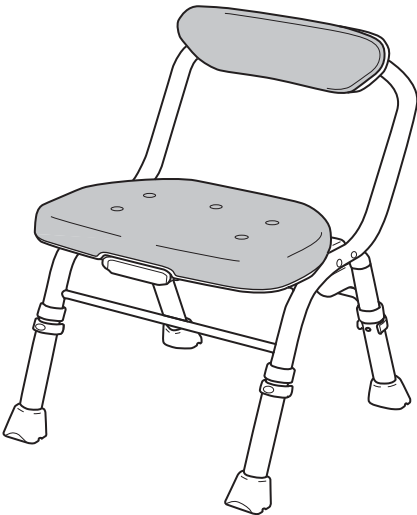


●J型有扶手

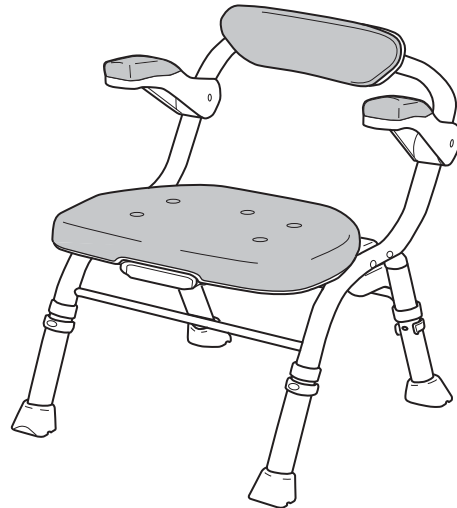

●蓮蓬頭放置架

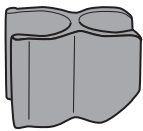

蓮蓬頭放置架使用例

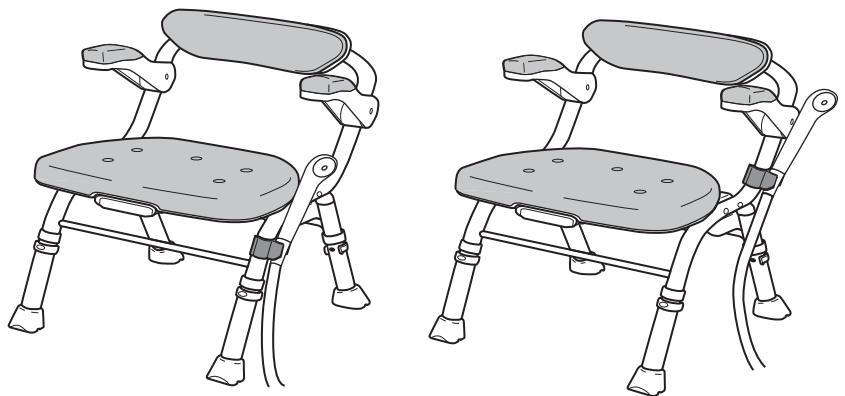

## 使用方法


### ▲ 注意

扶手型浴椅請將扶手放下後再使用。  
在折疊前請將扶手抬起後再進行折疊。


### 1 浴椅的打開方法（插圖為扶手型浴椅）

- ① 請先將前腳稍稍從地面抬起後，把靠背向地面方向按下。
- ② 按到座面與地面成同一水平面。  
請確認座面鎖扣是否扣住鎖桿。  
※無靠背型的浴椅，請將座面向地面方向按下，同時請務必站立在浴椅的側面進行操作。


①

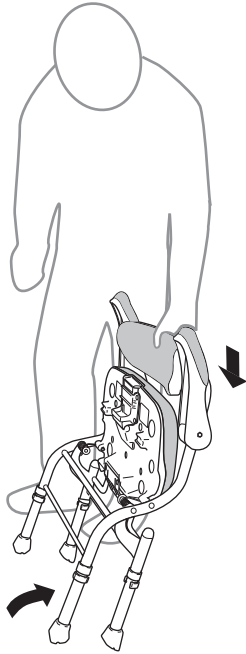

②

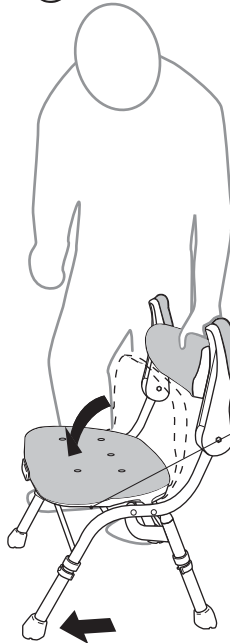

座面下鎖扣鎖住時的狀態

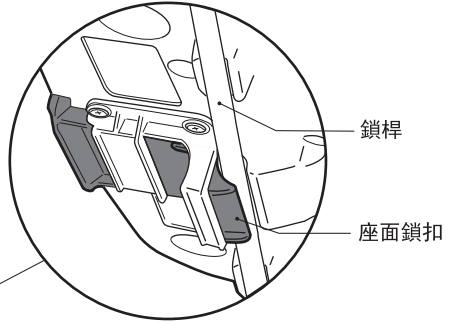


鎖桿

座面鎖扣


### 2 浴椅折疊方式

- ① 拉出鎖扣解除桿，解除座面鎖扣。
- ② 拉出鎖扣解除桿時，抬起座面，即可簡單地進行折疊。（浴椅折疊狀態時可自立。）

①

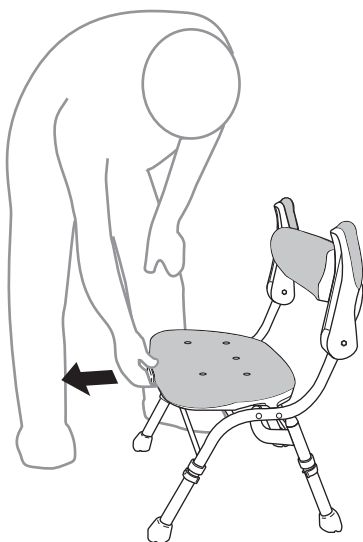

座面下鎖扣解除時的狀態

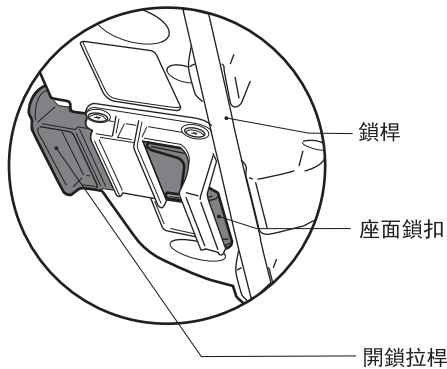


鎖桿

座面鎖扣

開鎖拉桿

②

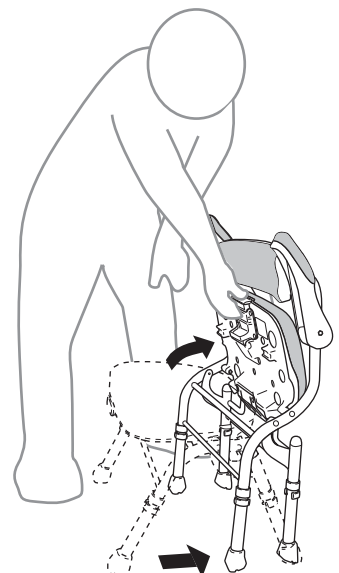

### ▲ 警告

- 在打開本商品時，靠背型浴椅請用手握住靠背、無靠背型浴椅請握住鎖扣解除桿進行。因為在打開時手握其他地方可能會發生手或手指被夾住的情況。
- 折疊浴椅時，站立位置不同，可能會造成腳被浴椅腳夾住的情況。當站立在浴椅側面折疊浴椅時，請不要把腳放入折疊椅下方，會導致受傷。


### ▲ 注意

- 使用前請再次確認座位下方的鎖扣是否固定住。


## 椅腳高度調節方法

出貨時，產品都調節為最低。  
椅腳的高度調節時，請放置在平穩的地方進行操作。

### 1 拿出高度調節插栓。

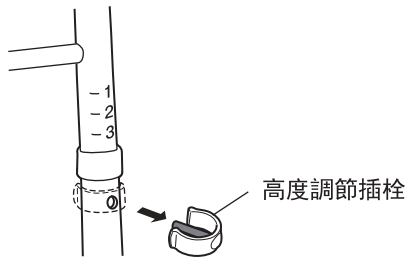

### 2 高度調節管上下移動調節到適合高度。


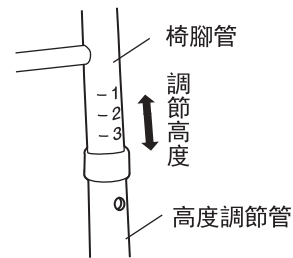


座面高度基準

椅腳的高度調節刻度		1	2	3	4	5	6
座面高度	M·R·U型	35cm	37cm	39cm	41cm	43cm	45cm
	J型	32cm	34cm	36cm	38cm	40cm	42cm

座面的高度有6階段可以調節。

### 3 高度調節插栓插入到適合高度

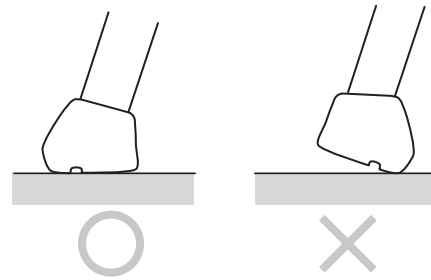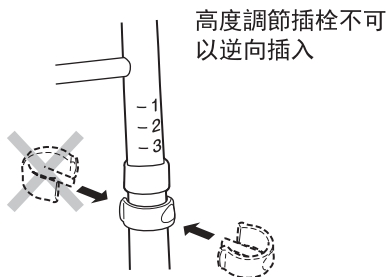

#### ▲注意


- 使用前請確認4根高度調節管是否已調節至相同高度，否則會發生傾斜、跌倒。
- 請確認高度調節插栓是否已從調節孔露出並固定。否則高度調節管會發生意外移動導致跌倒。

#### ▲注意

- 高度調節管是有方向性的，為了能讓橡膠腳部與地面完全接觸在一起，請調整高度調節管上的調節孔。



## 橡膠腳墊脫落時

請將高度調節管上的凹線與橡膠椅腳的凸線位置對准後，完全插入。

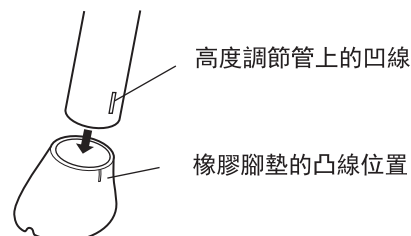

## 蓮蓬頭放置架使用方法

蓮蓬頭放置架是為掛住蓮蓬頭的設計。  
淋浴放置架是可以安裝和脫卸。  
安裝在椅腳管的時候，把蓮蓬頭放置架按到「喀嚓」聲音。

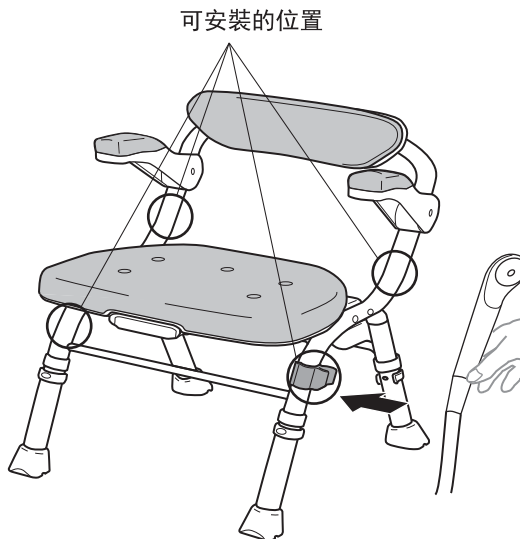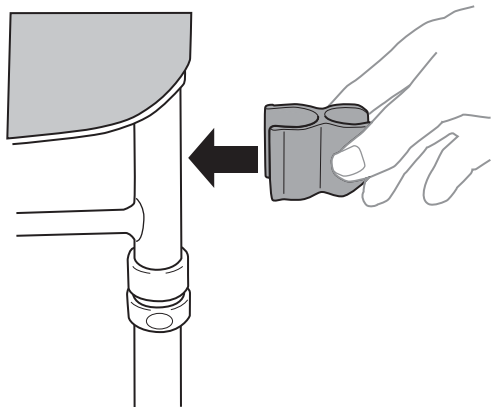

### ▲ 注意

- 請在淋浴時先將熱水溫度確認之後進行淋浴，以免造成燙傷。
- 請不要將淋浴掛鉤掛在可以安裝範圍之外的地方，以免造成商品的損壞。
- 水勢過強的情況下，會造成蓮蓬頭會從掛鉤上掉落，請控制好水勢流量後，再將蓮蓬頭掛在放置架。
- 洗完後，請不要將一直放置在掛鉤上，會引起掛鉤的損壞與變形。

## 扶手型使用方法


扶手可以左右單獨上下活動

### ▲ 注意

- 收納及移動座椅時請將扶手拉起。
- 請勿在有人入坐的時候進行搬運。


### 1 扶手豎起方法

將扶手抬起至扶手不能動的位置。

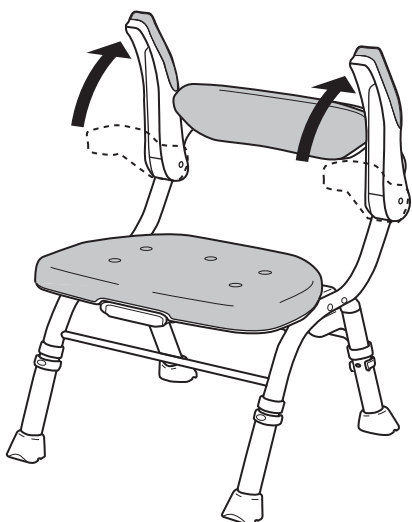

### 2 扶手放下方法

將豎起的扶手慢慢放倒至不能動的位置。

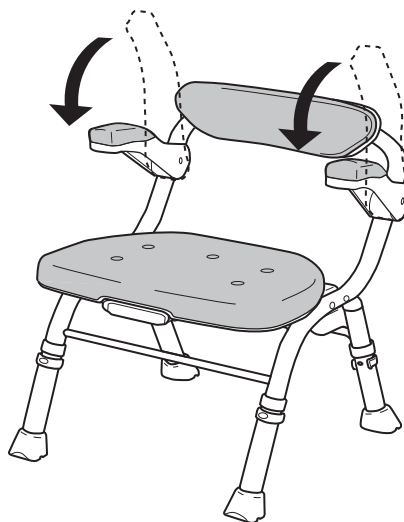

### ▲ 警告


- 扶手上下拉動時，請注意不要將手和手指夾入，會導致受傷。

### ▲ 注意

- 扶手上下拉動時，請按住本商品進行操作，會導致商品顛倒造成受傷。
- 請不要握住扶手抬起本商品，會導致本商品的損壞或對人體造成傷害。
- 請勿將浴椅扶手代替扶手支撐，或在浴椅扶手的單（側）面過度用力，會導致跌倒，對人體造成傷害。
- 請勿過度加力於扶手，會導致旋轉軸部分損壞。

## 保養

### ① 拆下柔軟座面，柔軟靠背

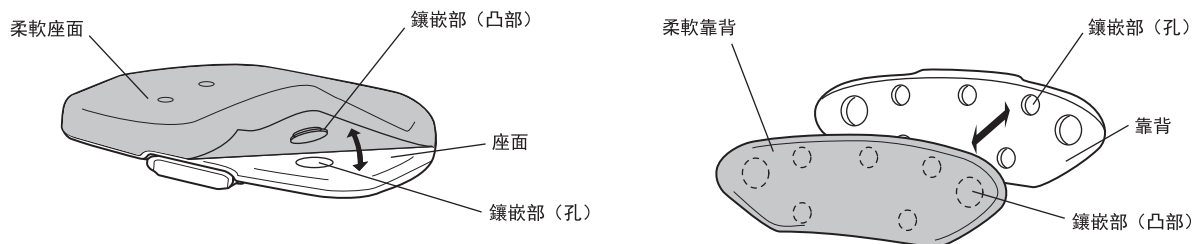

- 拆下時，往外按壓座面以及靠背的背面可以看到的鑲嵌在裡面的凸出部分。除此之外的地方請不要強行向外按壓，否則會容易造成鑲嵌部位斷裂。
- 安裝時，請將柔軟座面以及靠背背面鑲嵌部（凸處）與浴椅鑲嵌處（孔）對準之後進行按壓。（請注意安裝的前後方向）

#### ▲ 注意

- 將無色的中性洗滌液經稀釋後，用海綿或者柔軟的布擦洗去污後用清水沖洗。
- 擦上洗滌液後，放置時間請勿超過10分鐘。
- 沾染污漬後請馬上清洗，否則座面和靠背會留下污痕。
- 擦去污垢後請不要將商品放置在戶外或者直射陽光下。以免造成商品的褪色和裂紋。
- 請勿使用含氯漂白劑，鹼性洗滌液，有機溶液。否則會造成EVA樹脂，塑料，鋁管變質和褪色。
- 長時間潮濕狀態下可能會導致商品生鏽，使用後請用乾布擦洗乾淨，將商品放置於濕氣少常通風的地方保管。

## 規格

產 品	尺寸（寬度×深度×高度）（cm）		座面高度（cm）	重 量（kg）
	椅子打開的狀態	折疊的狀態		
M型無靠背	38.5×39.5~47×35~45	38.5×18×56	M、R、U型 35~45 (可6階段調節)	2.4
M型有靠背L	38.5×39.5~47×47.5~57.5	38.5×21.5×56.5		2.9
M型有靠背H	38.5×39.5~47×59~69	38.5×20×67.5		3.0
J型有扶手	46×38~46.5×58~68	46×19×72.5		4.1
R型無靠背	49.5×45~54×35~45	49.5×19.5×61.5		3.2
R型有靠背	49.5×45~54×63~73	49.5×19×74		3.9
R型有扶手	49.5×45~54×63~73	49.5×20×80.5		4.9
U型有靠背	49.5×45~54×63~73	49.5×19×74		3.8
U型有扶手	49.5×45~54×63~73	49.5×20×80.5		4.7

材 質	座面、靠背	聚乙烯
	柔軟座面、柔軟靠背	EVA樹脂
	椅腳、高度調節管	鋁
	橡膠腳	合成橡膠
	螺絲、彈簧墊圈、波紋墊片	不銹鋼
	扶手	聚丙烯、TPE、不銹鋼
	蓮蓬頭放置架	聚甲醛
最大使用者體重	100 kg	
耐熱溫度	70℃	



○由於產品質量改善的需要，有可能未經預告而變更部分式樣。

如對本產品的質量有疑問，敬請聯絡以下的電話號碼。

**株式會社利其爾**  
**Richell Corporation**  
136 Sakuragi-Mizuhashi, Toyama,  
939-0592 Japan  
<http://www.richell.co.jp/>  
MADE IN CHINA

